

Phrozen 3Dプリンター導入3点セット

歯科医院・歯科技工所でも導入しやすいよう、日本語対応のスライサーソフトで簡単に操作ができる使いやすいと好評の**SONIC MIGHTY REVO**と洗浄&二次硬化機、水道水で洗浄できる**ブーストレジン 1,000g**をセットにしました。使い方講習や困った時の相談、遠隔操作でも対応が可能なデンタルサポート2年間も一緒にご提供！リモート設置講習では開封から1回目のプリントまでをサポートし、導入後に現場すぐお使いいただけます！



**保守プラン
デンタルサポート**
契約していない場合はサポート対象外！
[プリント.com](#)

SONIC MIGHTY REVO+デンタルサポート PLUS 2年間 + リモート設置講習

歯科模型5~6個分の造形範囲に高精度な造形ができる、当社おすすめの歯科用3Dプリンター。

595,000円(税抜)



Phrozen Wash & Cure キット (洗浄&二次硬化機)

ビルドプレートごと洗浄できる大型の洗浄機と、歯科模型5~6個分が入る簡単操作で使いやすい二次硬化機がセットに。

80,000円(税抜)



5色のラインナップから1つ選べます
オルソホワイト / グレー / ミルキー / ホワイト / クリア

ブーストレジン 1,000g

IPAやエタノールを使わず水道水で洗浄ができるレジン。

23,000円(税抜)

セット価格 **698,000円** 税抜

デンタルサポートについて

**初めての3Dプリンターでも
あんしんの2年間サポート**

3Dプリンター初心者の歯科医院や歯科技工所でも安心のサポート体制。初期設定や使用方法のご案内、トラブル時のご対応、レジンパラメーターのご相談や修理、点検サービスをご提供します。

設置サポート
設置場所の相談
写真でトラブル相談
修理点検サービス

 **基本サポート**

 **修理サポート**

- ・ 電話、SNS、メールでの優先サポート対応
- ・ リモートデスクトップでの遠隔サポート
- ・ 機器の設置場所や設置方法に関するご相談
- ・ 機器の操作方法に関するご相談
- ・ 各種レジンパラメーター^{※1}の詳細なご相談
- ・ 造形やサポート材の設計に関するアドバイス

* 基本サポートは祝日・休日を除く平日10~17時の対応となります。
*1 当社で取扱いのないレジンはサポート対象外となります。※2 別途送料を頂戴します。※3 別途デポジット料と送料を頂戴します。※4 別途交通費を頂戴します。

消耗品



レジンVAT
25,100円(税抜)



PFA
交換用PFAフィルム 5枚入
10,800円(税抜)



ビルドプレート
22,200円(税抜)



後処理セット
5,000円(税抜)



エタコール7 1L(レジン洗浄用)
2,200円(税抜)



▲商品詳細はこちらから
<https://www.プリント.com>

3Dプリンター造形の流れ

STEP 1
口腔内スキャン



iTeroなどの口腔内スキャナーでスキャンし模型データを作成する。

STEP 2
データ取り込み & 編集



3Dデータを取り込み、スライサーで造形用にデータの調整やサポート材を作成する。

STEP 3
造形



作成したデータを3Dプリンターに転送して造形を開始する。

STEP 4
洗浄



仕上がった模型はレジンの種類に合わせて水道水またはアルコールで洗浄する。

STEP 5
乾燥



模型の表面に付着している水分をエアブローガン等を使用し完全に乾燥させる。

STEP 6
二次硬化



二次硬化機を使用し模型にUVライトを当てて硬化。最後に形を整えて完成です。